



Micro-Cosmos SL

Manual de Uso

Prefacio




Acerca de este documento

Este manual está destinado al usuario final del Micro-Cosmos SL. Este manual contiene toda la información necesaria para una instalación y un uso correctos, seguros y eficientes del Micro-Cosmos SL. Guarde este manual en un lugar accesible cerca del Micro-Cosmos SL, para poder consultarlo.

Condiciones de garantía

El Micro-Cosmos SL se entrega con un período de garantía de 24 meses después de la compra.

Símbolos

Símbolo	Significado
 ADVERTENCIA	Este símbolo indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o mortales.
 PRECAUCIÓN	Este símbolo indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o daños al producto.
AVISO	Este símbolo indica una situación que no está relacionada con lesiones físicas.
 i	Este símbolo indica información adicional útil.

1 Información del producto

1.1 Descripción del producto

La Micro-Cosmos SL es una cúpula de cama ajustable que reduce los estímulos externos incómodos en el entorno hospitalario. La Micro-Cosmos SL proporciona una sensación de seguridad y privacidad y permite a los pacientes dormir mejor. Gracias al ajuste manual que es infinitamente variable, la cúpula se puede ajustar a cualquier posición abierta o cerrada requerida, según lo desee el usuario. Además, se puede reproducir un tema con luz y sonido dentro de la cúpula para estimulación y distracción.


1.2 Uso previsto y uso incorrecto

El Micro-Cosmos SL está diseñado exclusivamente para ser utilizado como cúpula. El Micro-Cosmos SL está diseñado exclusivamente para ser utilizado en combinación con una cama (hospitalaria) o una silla (de ruedas). El Micro-Cosmos SL está diseñado exclusivamente para uso en interiores.

1.3 Especificaciones generales

Nombre del producto	Micro-Cosmos
Dimensiones (l x w x h)	Plegado: 749 x 1210 x 1300 mm Desplegado: 1300 x 1210 x 1450 mm
Peso	45 kg
Material	Plástico ABS, SS Acero, Aluminio, Plástico

1.4 Componentes principales

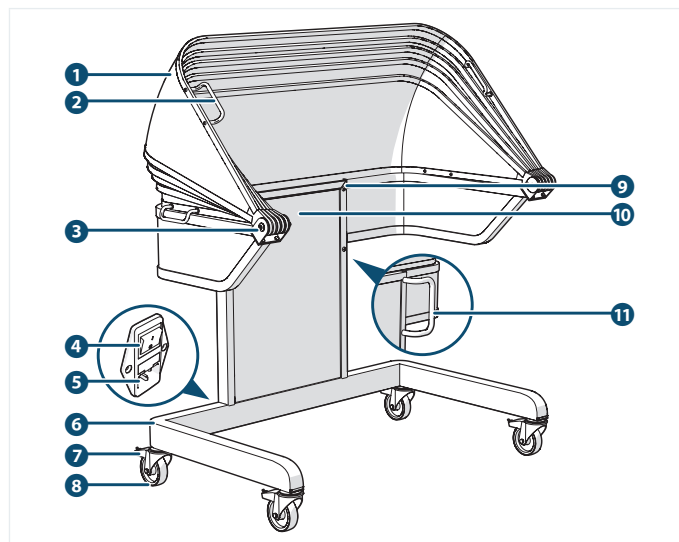

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 Cúpula para cama | 7 Freno de rueda |
| 2 Asa | 8 Rueda |
| 3 Bisagra | 9 Fuente de luz LED |
| 4 Asa del bastidor | 10 Altavoces integrados |
| 5 Conexión de alimentación | 11 Asa de transporte |
| 6 Bastidor | |

2 Seguridad

Asegúrese de haber leído y comprendido completamente las instrucciones de seguridad de este manual antes de instalar o utilizar Micro-Cosmos SL.

2.1 Medidas de seguridad

En el diseño del Micro-Cosmos SL se tomaron las siguientes precauciones de seguridad para evitar situaciones peligrosas:

- Ruedas con freno;
- Manijas para mover y abrir/cerrar la cúpula.

2.2 Advertencias e instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- **¡Peligro de aplastamiento!** Asegúrese de que los tubos y cables intravenosos no pasen por debajo o entre el Micro-Cosmos SL para evitar que se aplasten. Deje siempre que los tubos, cables y líneas intravenosas pasen por el exterior o la parte delantera del Micro-Cosmos SL.

- **¡Peligro de asfixia!** No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Guarde el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN

- **¡Peligro de aplastamiento!** Al abrir o cerrar la Cúpula, mantenga siempre las manos y los dedos alejados de los componentes móviles.
- **¡Peligro de aplastamiento!** Asegúrese de que al menos dos de las cuatro ruedas estén bloqueadas para evitar que el Micro-Cosmos SL se desplace.

AVISO

- Al colocar el Micro-Cosmos SL, asegúrese de que haya suficiente espacio para que los usuarios puedan realizar tareas alrededor del mismo.
- No deje caer el Micro-Cosmos SL y evite golpes para evitar daños.
- No utilice detergentes químicos agresivos, como lejías y abrasivos, para limpiar el Micro-Cosmos SL.

3 Transporte


- 1 Saque el Micro-Cosmos SL del palé.
- 2 Presione los frenos de las ruedas con el pie para liberarlas.
- 3 Haga rodar el Micro-Cosmos SL hasta la ubicación deseada.

4 Instalación

4.1 Comprobación del contenido del embalaje

- 1 Retire el material de embalaje.
- 2 Compruebe que estén presentes todos los componentes.
- ⓘ Si faltan componentes o están dañados, póngase en contacto con el distribuidor.

4.2 Colocación de Micro-Cosmos SL

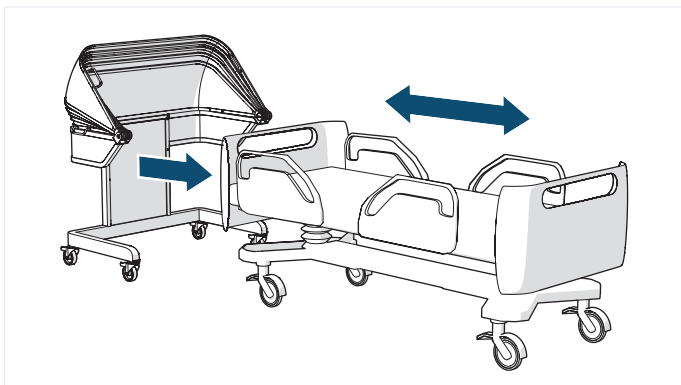

Coloque Micro-Cosmos SL de la siguiente manera:


- 1 Coloque la cama al menos a 80 cm de la pared.
- 2 Mantenga libre de obstáculos el área detrás de la cama.
- 3 Presione los frenos de las ruedas con el pie para liberarlas.
- 4 Haga rodar Micro-Cosmos SL detrás del cabecero de la cama. Asegúrese de que Micro-Cosmos SL y la cama estén

alineados.

- 5 Presione los frenos de las ruedas con el pie para bloquearlas.
- 6 Conecte Micro-Cosmos SL a la red eléctrica en la parte posterior.
- 7 Coloque el interruptor basculante junto a la conexión de alimentación en la posición I.
- 8 Asegúrese de que la cama y el Micro-Cosmos SL sean compatibles.

5 Uso


5.1 Apertura y cierre del Micro-Cosmos SL

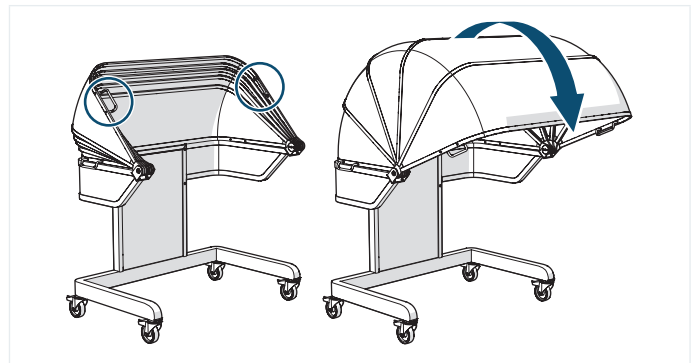

El Micro-Cosmos SL se puede abrir y cerrar empujando la Cúpula para abrirla o cerrarla con las asas. La Micro-Cosmos SL se puede abrir o cerrar por delante y por detrás.

La Micro-Cosmos SL no debe utilizarse como dispositivo de contención. La Micro-Cosmos SL se puede ajustar a cualquier posición, lo que permite controlar el grado de aislamiento del entorno. El cliente o paciente a menudo puede abrir la Micro-Cosmos SL de forma independiente y/o salir de debajo de la Micro-Cosmos SL para levantarse de la cama. Si el paciente o cliente tiene discapacidades físicas o mentales, la Micro-Cosmos SL no debe cerrarse más de 3/4 para que siempre pueda levantarse de la cama.

5.2 Funciones de luz y sonido

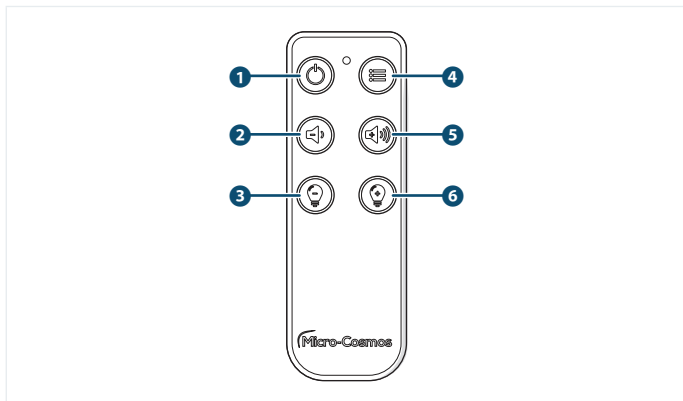


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Botón de encendido/apagado | 4 Botón de tema |
| 2 Botón para bajar el volumen | 5 Botón para subir el volumen |
| 3 Botón para bajar el brillo | 6 Botón para subir el brillo |

- i** Las funciones de luz y sonido solo funcionan cuando el Micro-Cosmos SL está conectado a la red eléctrica.
- Pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia para activar las funciones de luz y sonido.
- Pulse el botón de tema para cambiar entre diferentes temas.
- Pulse los botones de volumen para ajustar el volumen del sonido.
- Pulse los botones de brillo para ajustar el brillo de la luz.

6 Mantenimiento

Limpie el Micro-Cosmos SL después de cada uso. Por ejemplo, utilice toallitas de limpieza Clean ,n Easy Wecoline o un paño de microfibra húmedo para limpiar el Micro-Cosmos SL. En situaciones en las que se requiera la desinfección del Micro-Cosmos SL, este se puede desinfectar con toallitas con alcohol (70 %) o toallitas BacilloI (30 y AF).

6.1 Ajuste de la resistencia de la cúpula

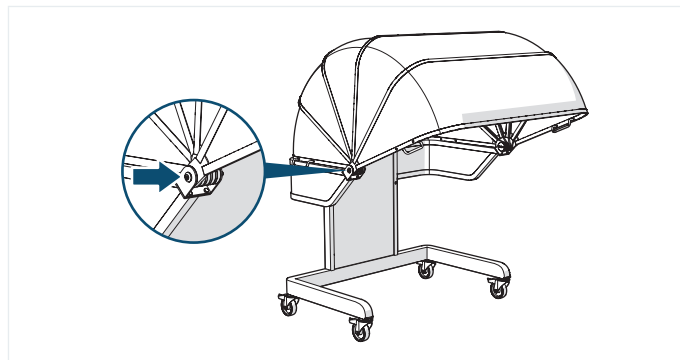

Después de un tiempo, es posible que la cúpula no permanezca en la posición deseada por sí sola. En este caso, se debe ajustar la bisagra:

- 1 Apriete los tornillos de cabeza hueca a ambos lados de la cúpula con una llave Allen.
 - 2 Abra y cierre la cúpula para probar la resistencia.
 - 3 Si es necesario, apriete los tornillos de cabeza hueca hasta lograr la resistencia deseada.
- i** Si la cúpula hace ruido al abrirse o cerrarse, rocíe un lubricante, como WD-40, en el exterior del sistema de bisagra. Luego repita los pasos 2 y 3.

7 Distribuidor

Micro-Cosmos B.V.
Toernooiveld 100
6525 EC Nijmegen, Países Bajos
+316 49397363
info@micro-cosmos.nl
www.micro-cosmos.nl